



Rezūm™

بخار آب درمانی

Rezūm یک روش جایگزین کم تهاجمی و ماندگار است که به جای درمان دارویی و روش‌های جراحی متداول برای درمان BPH، استفاده می‌شود.

مزیت‌های دستگاه

- اولین گزینه درمانی
- ریسک پایین درمان مجدد
- حفظ عملکردهای جنسی و ادراری
- بهبودی قابل توجه علائم در عرض دو هفته
- تسکین ایمن و موثر علائم
- امکان بازگشت به فعالیت‌های روزانه در عرض چند روز
- امکان درمان پروستات با بزرگی خوش خیم لوب‌های جانبی، ناحیه میانی و لوب میانی
- دارای تاییدیه FDA و انجمن اورولوژی آمریکا

سیستم Rezūm چگونه کار می‌کند؟

سیستم Rezūm روش درمان حرارتی از میان مجرا است که از بخار آب استریل برای درمان بزرگی خوش خیم پروستات استفاده می‌کند. این دستگاه با رساندن مستقیم دوزهای هدفمند انرژی حرارتی به غده پروستات، باعث از بین بردن بافت انسدادی ایجادکننده بیماری BPH می‌شود.



درمان حرارتی بخار آب از طریق Rezūm برای کاهش علائم بزرگی خوش خیم پروستات: نتایج ۴ ساله از مطالعه نمونه‌های کنترل تصادفی

آخرین آنالیزهای منتشر شده نشان می‌دهد که بخار آب درمانی از طریق Rezūm در طی ۴ سال تحقیقات، باعث بهبود قابل توجه و مستمر علائم دستگاه ادراری تحتانی (LUTS) و QOL برای بیمارانی که تحت درمان برای بزرگی خوش خیم پروستات بوده اند، می‌شود. فاکتورهای بهبود یافته شامل Qmax، QOL، IPSS و BPHII هستند که بهبود مداوم و با دوام طی ۳ ماه پس از عمل را نشان می‌دهند.

اطلاعات مطالعات ۴ ساله

 135 Subjects 15 Sites	Durable	Sustained Results	
	Surgical Retreatment Rate 4.4%	International Prostate Symptom Score (IPSS) ↓ 10.1 pts (46.7%)	Quality of Life Impact (QOL) ↓ 2.0 pts (42.9%)
		Maximum Flow Rate (Qmax) ↑ 4.2 mL/sec (49.5%)	BPH Impact Index (BPHII) ↓ 3.5 pts (52.2%)

این دستگاه علاوه بر بهبود علائم و QOL، مزایایی از قبیل احتمال پایین جراحی مجدد را دارد که فقط در ۴.۴٪ از افراد، طی ۴ سال، عمل جراحی مجدد صورت گرفته است. همچنین مطالعات نشان می‌دهد که این روش ایمن است، عملکرد جنسی افراد را حفظ می‌کند، عوارض جانبی طولانی مدت ندارد و گزارشی از ایجاد ناتوانی جنسی در طی ۴ سال وجود نداشته است.

برای مطالعه بیشتر در مورد بخار آب درمانی از طریق Rezūm و اطلاع از سایر محصولات مربوط به انواع روش‌های درمان BPH لطفاً با کارشناسان شرکت ماوای فنون عصر نمایندگی کمپانی Boston Scientific آمریکا تماس بگیرید و یا به سایت www.rezum.com مراجعه فرمایید.

نگاه اجمالی به مراحل انجام عمل با Rezūm

قبل از عمل

- قطع کردن داروهای ضد انعقاد در صورت نیاز
- مصرف آنتی بیوتیک‌ها در صورت نیاز
- مصرف داروهای ضد درد در صورت نیاز

روز عمل

- انجام عمل در طی فقط چند دقیقه
- مصرف داروهای ضد درد در صورت نیاز

بعد از عمل

- ادامه داروهای آنتی بیوتیک
- استفاده از سوند، تا چند روز پس از عمل
- پرهیز از برخی فعالیت‌ها که ممکن است باعث تحریک پروستات شود
- اگر احساس ناخوشایند وجود داشت:
- مصرف مسکن‌ها در صورت نیاز
- نشستن در وان آب گرم
- حذف کافئین، شکلات و الکل به صورت موقت از رژیم غذایی



شریعتی، بالاتر از میرداماد، خیابان شوری، پلاک ۴۲
تلفن: ۲۶۷۰۰۵۰۱
www.m-f-agroup.com