

Rezūm™


بخار آب درمانی

Rezūm یک روش جایگزین کم تهاجمی، ماندگار و قابل استفاده در مطب می باشد که بجای درمان دارویی برای درمان BPH، استفاده می شود.

- اولین گزینه درمانی
- ریسک پایین درمان مجدد
- حفظ توانایی جنسی
- بدون نیاز به ایمپلنت دائمی
- امکان درمان پروستات با بزرگی خوش خیم لب های جانبی، ناحیه میانی و لوب میانی

سیستم Rezūm چگونه کار می کند؟

سیستم Rezūm روش درمان حرارتی از میان حالب است که از بخار آب استریل برای درمان بزرگی خوش خیم پروستات با رساندن دوزهای هدفمند انرژی حرارتی به طور مستقیم به غده پروستات و از بین بردن بافت انسدادی که باعث بیماری BPH می شود، استفاده می کند.

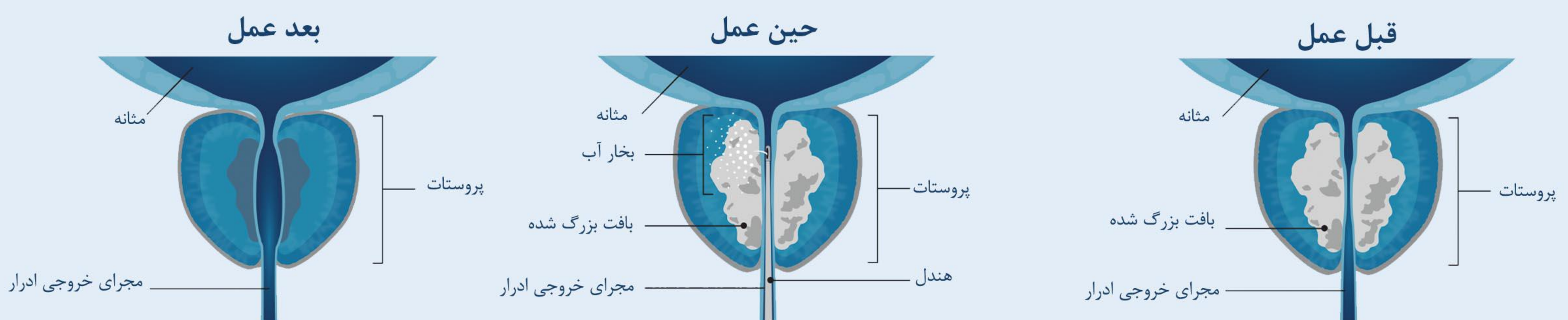

Rezum یک روش جایگزین کم تهاجمی، ماندگار و قابل استفاده در مطب می باشد که بجای درمان دارویی برای درمان BPH، استفاده می شود.

درمان حرارتی بخار آب از طریق Rezum برای کاهش علائم بزرگی خوش خیم پروستات: نتایج 4 ساله از مطالعه نمونه‌های کنترل تصادفی

آخرین آنالیزهای منتشر شده نشان می دهد که بخار آب درمانی از طریق Rezum در طی 4 سال باعث بهبود با دوام و قابل توجه علائم دستگاه ادراری تحتانی (LUTS) و QOL برای بیمارانی که تحت درمان برای بزرگی خوش خیم پروستات بوده اند، می شود. فاکتورهای بهبود یافته شامل Qmax، QOL، IPSS و BPHII هستند که بهبود مداوم و با دوام بعد از 3 ماه پس از عمل را نشان می دهند.

اطلاعات مطالعات 4 ساله

 135 Subjects 15 Sites	Durable	Sustained Results	
	Surgical Retreatment Rate 4.4%	International Prostate Symptom Score (IPSS)	Quality of Life Impact (QOL)
		↓ 10.1 pts (46.7%)	↓ 2.0 pts (42.9%)
		Maximum Flow Rate (Qmax)	BPH Impact Index (BPHII)
		↑ 4.2 mL/sec (49.5%)	↓ 3.5 pts (52.2%)

به اضافه بهبود علائم و QOL، مزایایی از قبیل نرخ پایین جراحی مجدد، که فقط در 4.4% از افراد، طی 4 سال، تحت عمل جراحی مجدد قرار گرفته اند. مطالعات نشان می دهد که روشی ایمن است و عملکرد جنسی افراد را حفظ می کنند، عوارض جانبی طولانی مدت ندارد و گزارشی از ایجاد ناتوانی جنسی در طی 4 سال وجود نداشته است.

برای مطالعه بیشتر در مورد بخار آب درمانی از طریق Rezum و اطلاع از سایر محصولات مربوط به انواع روش های درمان BPH لطفاً با کارشناسان Boston Scientific تماس بگیرید و یا به سایت Bostonscientific.com/bph مراجعه فرمایید.

نگاه اجمالی به مراحل انجام عمل با Rezum

قبل از عمل

- قطع کردن داروهای ضد انعقاد در صورت نیاز
- مصرف آنتی بیوتیک ها در صورت نیاز
- مصرف داروهای ضد درد در صورت نیاز

روز عمل

- انجام عمل در طی فقط چند دقیقه
- مصرف داروهای ضد درد در صورت نیاز

بعد از عمل

- ادامه داروهای آنتی بیوتیک، بعد از عمل
- استفاده از سوند، تا چند روز پس از عمل
- پرهیز از برخی از فعالیت ها که ممکن است باعث تحریک پروستات شود



شریعتی، بالاتر از میرداماد، خیابان شواری، پلاک ۴۲

تلفن: ۲۶۷۰۰۵۰۱

www.m-f-agroup.com